

APTEO ZESTAW PASTERÓW NA PĘCHERZE



Cena: 14,56 PLN

Opis słownikowy

Producent	SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

APTEO Zestaw plastrów na pęcherze

Hydrokoloidowy opatrunek absorbuje wydzielinę, która powstaje w pęcherzu. Hipoalergiczny klej. Plastry są elastyczne i dobrze przylegają do skóry. Dyskretne i cienkie. Sterylne.

Zawartość:

7 plastrów o wymiarach:

44 mm x 69 mm - 2 szt.

30 mm x 60 mm – 2 szt.

20 mm x 60 mm- 3 szt.

Sposób użycia:

1. Oczyszczyć i dokładnie osuszyć uszkodzoną skórę.
2. Z plastra usunąć powierzchniową warstwę, przyłożyć bezpośrednio na pęcherz, delikatnie dociskając dookoła.
3. Usunąć transparentną folię, unikając dotykania warstwy samoprzylepnej.
4. Plaster może pozostawać na pęcherzu do kilku dni.

Środki ostrożności:

Tylko do użytku zewnętrznego.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Usunąć natychmiastowo przy pierwszych oznakach odczuwalnego dyskomfortu lub podrażnienia.

Nie rozcinać.

Nie stosować na zainfekowane rany albo oparzenia.

Jeżeli rana pęcherza pogarsza się skonsultować się z lekarzem.

Osoby chore na cukrzycę lub na choroby krążenia powinny przed użyciem skonsultować się z lekarzem.