

## BLEND-A DENT Extra Strong Klej d/protez

Cena: 17,34 PLN



### Opis słownikowy

Producent	PPHU MINI-MAXI IRENA WYDRA
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny

### Opis produktu

Zapewnia optymalne, mocne utrzymanie protezy na właściwym miejscu. Dzięki swoim właściwościom ogranicza otarcia dziąseł i dyskomfort związany ze zbieraniem się pokarmu pod protezą.

#### Jak stosować

Instrukcja użycia:

1. Dokładnie oczyścić protezę i dziąsła.
2. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, nałóż krem punktowo wzdłuż krawędzi i na powierzchniach protezy, które stykają się z jamą ustną.
3. Przed założeniem protezy przepłucz jamę ustną wodą. Nasz krem do protez został tak opracowany, aby pod wpływem wilgoci tworzyć ciekłą, szczelną barierę chroniącą przed przedostawaniem się resztek jedzenia.
4. Mocno dociśnij protezę w odpowiednim miejscu i chwilę przytrzymaj.
5. Dla najlepszych rezultatów odczekaj 15-30 minut przed jedzeniem lub piciem