

Blephaclean Chusteczki d/higieny powiek 20



Cena: 39,03 PLN

Opis słownikowy

Producent	THEA POLSKA SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Blephaclean, chusteczki sterylne do codziennej higieny powiek.

To jałowe chusteczki, nasączone płynem oczyszczającym do profesjonalnej higieny powiek i ich brzegów. Pomagają utrzymać powieki w czystości, nie naruszając jednocześnie naturalnej bariery ochronnej (mikrobiologicznej) skóry wokół oczu.

Bez konserwantów.

Chusteczki Blephaclean

- są nasączone dobrze tolerowanym płynem oczyszczającym do profesjonalnej higieny wrażliwych okolic oczu,
- nawilżają i łagodzą podrażnienia,
- działają przeciwzapalnie i regenerująco,
- delikatnie rozpuszczają i usuwają substancje i bakterie zalegające na brzegach powiek.

Chusteczki Blephaclean przeznaczone są do codziennej higieny powiek, zwłaszcza w przypadku:

- wrażliwej skóry powiek i okolic oczu;
- konieczności usunięcia zanieczyszczeń, pyłków i wydzieliny z powiek. - Stosowanie produktu może być częścią pielęgnacji, gdy występuje alergia lub stan zapalny oczu;
- istniejącego podrażnienia, stanu zapalnego lub zakażenia powiek, takich jak zapalenie skóry powiek, zaburzenia czynności gruczołów Meiboma, jęczmień lub gradówka. Stany te mogą powodować objawy suchości oczu, takie jak swędzenie, uczucie piasku w oku, ból i (lub) zaczerwienienie oczu;
- przygotowania się do zabiegów okulistycznych, takich jak iniekcje wewnątrzgałkowe, laserowe korekcje wad wzroku (LASIK lub PRK) i operacje usunięcia zaćmy. Ponieważ produkt ten jest dobrze tolerowany, można stosować także po operacji, zgodnie z zaleceniami lekarza.

Produkt może być stosowany u dzieci w wieku powyżej 3 miesięcy.

Sposób użycia:

- Przed zabiegiem lub operacją okulistyczną należy stosować dwa razy dziennie przez 5 dni lub zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty.
- W pozostałych przypadkach należy stosować dwa razy dziennie, rano i wieczorem, przez 3 tygodnie, a następnie raz dziennie przez 3 miesiące lub zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. Niektóre stany zapalne powiek są przewlekłe i wtedy należy stosować higienę powiek i ich brzegów systematycznie i długoterminowo.
- Nie wymaga spłukiwania po użyciu.
- W przypadku noszenia soczewek kontaktowych należy je zdjąć przed zastosowaniem chusteczek.

Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników.

Do stosowania wyłącznie na skórę. Unikać bezpośredniego kontaktu z powierzchnią oka.

Wyłącznie do użytku jednorazowego.

Nie stosować chusteczki, jeżeli saszetka jest otwarta lub uszkodzona.

Ze względu na zawartość naturalnych ekstraktów roślinnych kolor chusteczek (roztworu) może się różnić.

Przechowywać w temperaturze 8-25oC.

Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.