

## COMPEED plastry na odciski między palcami 10 sztuk



Cena: 21,59 PLN

### Opis słownikowy

Producent	JOHNSON & JOHNSON
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny

### Opis produktu

**Compeed plastry na odciski - między palcami** Technologia hydrokoloidu COMPEED® to aktywny żel wspomagający nawilżanie. Plastry COMPEED® działają jak druga skóra, pomagając utrzymywać naturalne nawilżenie skóry, aby: - ochraniać przed otarciami i uciskiem. - przynosić natychmiastową ulgę w bólu i otarciach spowodowanych przez odciski. - nawilżać i zmiękczać odcisk, pomagając go usunąć. Zawartość opakowania: 10 plastrów na odciski - między palcami **Sposób użycia:** 1. Umyj oraz osusz skórę przed zastosowaniem. Upewnij się czy skóra dotknięta odciskiem nie jest tłusta od kremu czy oliwki. 2. Usuń górną warstwę papierową, starając się unikać dotykania warstwy samoprzylepnej. 3. Nałóż plaster mocno na odcisk, upewniając się, czy brzegi plastra są dobrze dociśnięte do skóry. 4. Pozostaw plaster na odcisku aż do momentu, kiedy sam zacznie się odklejać. Może pozostawać na miejscu nawet do kilku dni. Dla uzyskania lepszych rezultatów używaj COMPEED® aż do czasu kiedy skóra będzie całkowicie wyleczona z odcisku. **Przechowywanie:** Przechowywać w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. **Uwaga!** Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.