

## COMPEED plastry na zrogowacenia 6 szt.



Cena: 17,49 PLN

### Opis słownikowy

Producent	JOHNSON & JOHNSON
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny

### Opis produktu

**Compeed plastry na zrogowacenia - średnie** Technologia hydrokoloidu COMPEED® to aktywny żel wspomagający nawilżanie. Plaster COMPEED® działa jak druga skóra, pomaga utrzymywać naturalne nawilżenie skóry aby:- ochraniać przed otarciami i uciskiem.- przynosić natychmiastową ulgę w bólu.- nawilżać i zmiękczać zrogowacenie, pomagając je usunąć. Zawartość opakowania: 6 plasterków na zrogowacenia w rozmiarze średnim **Sposób użycia:** 1. Zmiękczyć skórę poprzez wymoczenie stopy w ciepłej wodzie. Usunąć zrogowacenia delikatnie ścierając ręcznikiem. 2. Umyć i osuszyć skórę. 3. Usunąć górną warstwę papierową plastra, następnie dolną warstwę starając się unikać dotykania warstwy samoprzylepnej. 4. Nałożyć plaster mocno na zrogowaczone miejsce. 5. Pozostawić plaster na zrogowaczeniu, aż do momentu kiedy sam zacznie się odklejać. Może pozostać na miejscu nawet do kilku dni. 6. Powtarzaj zabieg aż do momentu kiedy skóra będzie całkowicie wyleczona. **Przechowywanie:** Przechowywać w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. **Uwaga!** Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.