

COREGA Tabs Bioformel tabletki do czyszczenia protez zębowych 136 tabletek



Cena: 29,99 PLN

Opis słownikowy

Producent	GLAXOSMITHKLINE
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

COREGA Tabs Bioformel 136 tabletek

Unikalna formuła preparatu działa na 3 sposoby:

Zabija 99,9% bakterii, które są przyczynami nieświeżego oddechu, czyści protezę bez zarysowań, usuwa przebarwienia.

Składniki:

Sodium bicarbonate, Citric acid, Potassium caroate (Potassium monopersulfate), Sodium carbonate, Sodium carbonate peroxide, TAED, Sodium benzoate, PEG-180, Subtilisin, Sodium lauryl sulfoacetate, PVP/VA copolymer, Aroma, Subtilisin, CI 42090, CI 73015.

Sposób użycia:

Wrzuć tabletkę Corega do pojemnika lub szklanki z taką samą ilością ciepłej (nie gorącej) wody, aby można było w niej całkowicie zanurzyć protezę.

Pozostaw protezę w roztworze na przynajmniej 15 minut, po czym wyczyść ją miękką szczoteczką.

Następnie dokładnie opłucz protezę pod bieżącą wodą. Pozostały roztwór niezwłocznie wylej.

Przeznaczenie:

Tabletki do czyszczenia protez zębowych

Warunki przechowywania:

Tabletki należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Uwaga!

Pod żadnym wypadkiem nie połykać. Unikać kontaktu z oczami i jamą ustną.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.