

GRUSZKA silikonowa 75 ml APTEO pingwin



Cena: 10,79 PLN

Opis słownikowy

Producent	SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

GRUSZKA silikonowa 75 ml APTEO

Gruszka silikonowa z zaokrągloną końcówką zalecana do stosowania u dzieci od 6. miesiąca do 1. roku życia.

Zastosowanie w celu zapobiegania:

- infekcjom górnych dróg oddechowych poprzez usuwanie wydzieliny kataralnej z nosa
- stanom zapalnym uszu poprzez usuwanie woskowiny

Sposób użycia:

Przed każdym użyciem gruszkę umyć w ciepłej wodzie z mydłem, a następnie włożyć na 10 minut do gotującej się wody. Procedure powtórzyć również po użyciu gruszki.

Stosowanie do nosa:

gruszkę ścisnąć w dłoń, a następnie miękką końcówkę przyłożyć do otworu nosowego i uwolnić gruszkę z uścisku. Następuje zasysanie wydzieliny z nosa.

Stosowanie do uszu:

gruszką zassać niewielką ilość letniej wody, przechylić głowę na bok i zakropić ciecz do ucha. Nie wprowadzać głęboko miękkiej końcówki - należy pozwolić, aby woda powoli spłynęła po ścianie kanału słuchowego. Następnie przechylić głowę w przeciwną stronę, aby pozbyć się cieczy. Czynność powtórzyć.

Produkt do indywidualnego użytku.

Wszelkie czynności związane z użytkowaniem gruszki silikonowej powinna wykonywać osoba dorosła.

Gruszki silikonowej używać w sposób bardzo ostrożny, w razie jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć opinii specjalisty.

Nie stosować środków dezynfekujących.

Nie stosować w przypadku uszkodzenia i po upływie daty ważności.