

HYSAN maść do nosa 5 g

Cena: 26,50 PLN



Opis słownikowy

Producent	URSAPHARM
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Hysan maść do nosa

To maść z witaminą A zalecana do intensywnej i długotrwałej pielęgnacji nosa. Tworzy warstwę ochronną, która sprzyja procesowi regeneracji, przez co kojąco nawilża i pielęgnuje przedni odcinek nosa. Ułatwia usuwanie strupów i skorup. Rozprowadza się równomiernie dobrze na skórze i śluzówkach nosa. Bez środków konserwujących.

Skład

Hysan jest maścią do nosa zawierającą witaminę A, która oprócz 250 j.m./g palmitynianu retinolu (witaminy A) zawiera płynną parafinę o wysokiej gęstości i niskiej gęstości, lanolinę i białą wazelinę.

Wskazania

Hysan maść do nosa jest stosowana do nawilżania i pielęgnacji przedniej części nosa, np. w przypadku bolesności spowodowanej katarrem. Ze względu na brak konserwantów jest bezpieczny i może być stosowany przez dłuższy okres czasu.

Sposób użycia

Odkręcić nakrętkę.
Poprzez lekkie przyciśnięcie tuby wycisnąć niewielką ilość maści.
Bezpośrednio za pomocą końcówki tuby lub czystym koniuszkiem palca ostrożnie nałożyć wyciśniętą maść w okolicy przedsionka nosa lub otworu nosowego.
Rozprowadzić równomiernie maść na śluzówce i przedsionku nosa lekko masując skrzydełka nosa.
Ze względów higieny i w celu uniknięcia ewentualnego przeniesienia zakażenia każda tuba maści do nosa powinna być używana tylko przez jedną osobę.
Zaleca się wycieranie końcówki tuby po użyciu i dokładne zamykanie jej.
Przeciwwskazania i środki ostrożności

Nie należy stosować w przypadku stwierdzonej nadwrażliwości na którykolwiek z jej składników.

Przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25°C).

Po otwarciu należy zużyć w ciągu 6 miesięcy.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Możliwe działania niepożądane wyrobu medycznego

Należy przerwać stosowanie, jeśli wystąpią reakcje nadwrażliwości (np. świąd, zaczerwienienie). Objawy te zazwyczaj szybko ustępują po przerwaniu stosowania.