


IGLESSY Sterylne jedn.0,23*4 igły do penów

Cena: 17,00 PLN

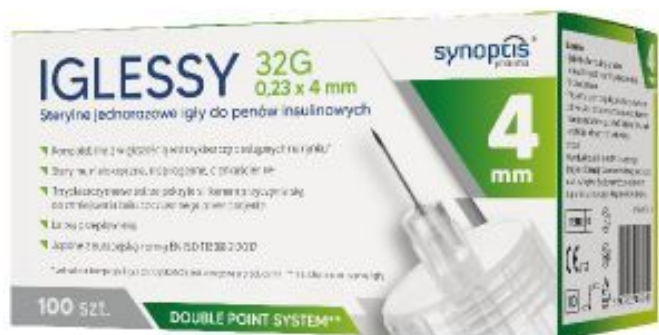

Opis słownikowy

Producent	SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

właściwości

Iglessy to sterylne jednorazowe igły do penów insulinowych. Wyrób medyczny przeznaczony do stosowania ze wstrzykiwaczem (penem) do podskórnych iniekcji płynnych leków do organizmu.

Kompatybilne z większością wstrzykiwaczy dostępnych na rynku.

Sterylna, nietoksyczna, niepirogenna, cienkościenne.

Trzyplaszczynowe ostrze pokryte silikonem zapewnia łatwe i bezbolesne wkłucie.

Łatwy przepływ leku.

Zgodne z europejską normą EN ISO 11608-2:2012.

Igły Iglessy są kompatybilne m.in. z:

NovoPen 4

NovoPen Echo

HumaPen savvio

HumaPen Ergo

HumaPen LUXURA HD

Humalog KwikPen

JuniorSTAR

SoloStar

GensuPen 2

Polhumin Pen

Działanie

Igły insulinowe Iglessy to wyrób medyczny przeznaczony do stosowania ze wstrzykiwaczem (penem) do podskórnych iniekcji płynnych leków do organizmu.

Sposób użycia

Pociągnąć za etykietkę, aby usunąć ją z igły do wstrzykiwacza.

Przymocować igłę do wstrzykiwacza, a następnie przekręcić, aby zabezpieczyć połączenie.

Zdjąć zewnętrzną osłonę z igły do wstrzykiwacza.

Zdjąć wewnętrzną osłonę z igły do wstrzykiwacza, a następnie postępować zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi

wstrzykiwania insuliny.
Założyć osłonę zewnętrzną na igłę do wstrzykiwacza oraz wstrzykiwacz.
Wyrzucić igłę do wstrzykiwacza do odpowiedniego pojemnika na odpady.