

IGLESSY Sterylne jedn.0,31*5 igły do penów

Cena: 17,00 PLN



Opis słownikowy

Producent	SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Igły insulinowe Iglessy - **właściwości**

Iglessy to sterylne jednorazowe igły do penów insulinowych. Wyrób medyczny przeznaczony do stosowania ze wstrzykiwaczem (penem) do podskórnych iniekcji płynnych leków do organizmu.

Kompatybilne z większością wstrzykiwaczy dostępnych na rynku.

Sterylnie, nietoksyczne, niepirogenne, cienkościenne.

Trzypląszczynowe ostrze pokryte silikonem zapewnia łatwe i bezbolesne wkłucie.

Łatwy przepływ leku.

Zgodne z europejską normą EN ISO 11608-2:2012.

Igły Iglessy są kompatybilne m.in. z:

NovoPen 4

NovoPen Echo

HumaPen savvio

HumaPen Ergo

HumaPen LUXURA HD

Humalog KwikPen

JuniorSTAR

SoloStar

GensuPen 2

Polhumin Pen

Działanie

Igły insulinowe Iglessy to wyrób medyczny przeznaczony do stosowania ze wstrzykiwaczem (penem) do podskórnych iniekcji płynnych leków do organizmu.

Sposób użycia

Pociągnąć za etykietkę, aby usunąć ją z igły do wstrzykiwacza.

Przymocować igłę do wstrzykiwacza, a następnie przekręcić, aby zabezpieczyć połączenie.

Zdjąć zewnętrzną osłonę z igły do wstrzykiwacza.

Zdjąć wewnętrzną osłonę z igły do wstrzykiwacza, a następnie postępować zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi

wstrzykiwania insuliny.
Założyć osłonę zewnętrzną na igłę do wstrzykiwacza oraz wstrzykiwacz.
Wyrzucić igłę do wstrzykiwacza do odpowiedniego pojemnika na odpady.