

# MICROLIFE INHALATOR NEB 210 KOMPRESOROWY

Cena: 143,91 PLN



## Opis słownikowy

Producent CHDE

Rodzaj rejestracji

## Opis produktu

### MICROLIFE INHALATOR NEB 210 KOMPRESOROWY

NEB 210 to najnowszy inhalator w rodzinie produktów Microlife. Dzięki doskonałej specyfikacji zapewnia najwyższe standardy leczenia dróg oddechowych.

Mały rozmiar cząstki, wysokie tempo nebulizacji z możliwością regulacji oraz jedna z najwyższych na rynku frakcji respirabilnych gwarantuje skuteczne leczenie w chorobach płuc.

Inhalator NEB 210 doskonale inhaluje leki kortykosteroidowe, zawiesiny czy roztwory z hialuronem.

Urządzenie jest kompaktowe i wygodne. Pozwala na szybkie i skuteczne wsparcie w leczeniu. Obsługiwane jest za pomocą jednego przycisku, dzięki czemu praca z inhalatorem jest niebywale prosta. Produkt może być używany przez całą rodzinę - bez względu na wiek.

Posiada regulowany przepływ do indywidualnego leczenia. Nadaje się do najpopularniejszych roztworów do inhalacji.

Sposób użycia wyrobu medycznego

Skrócona instrukcja obsługi:

1. Zmontować zestaw do inhalacji. Należy zwrócić uwagę czy dostępne są wszystkie części.
2. Napełnić komorę środkiem inhalacyjnym, pilnując by nie został przekroczony znak maksymalnego napełnienia komory.
3. Połączyć zestaw inhalacyjny z przewodem powietrznym do kompresora i podłączyć wtyczkę do sieci (230V 50 Hz AC).
4. Aby uruchomić urządzenie, należy ustawić przełącznik ON / OFF.
5. Zaleca się, aby w trakcie inhalacji siedzieć prosto i być zrelaksowanym. Nie należy leżeć podczas inhalacji. W razie pogorszenia samopoczucia należy natychmiast przerwać inhalację.
6. Po zakończeniu inhalacji, w czasie zalecanym przez lekarza, należy wyłączyć urządzenie. W tym celu powinno się ustawić przełącznik i odłączyć wtyczkę od zasilania.
7. Na koniec, zestaw inhalacyjny należy opróżnić z resztek leku a samo urządzenie wyczyścić.

Urządzenie jest odpowiednie do zastosowania domowego. Może być stosowany przez dzieci, młodzież i osoby dorosłe.