

Opatr.hydrokol. GRANUFLEX Extra Thin 10x10



Cena: 7,61 PLN

Opis słownikowy

Producent	CONVATEC
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Opatrunek Granuflex® Extra Thin 10x10

Opatrunek Granuflex Extra Thin są to jałowe opatrunki hydrokoloidowe, złożone z wewnętrznej (stykającej się z raną) warstwy hydrokoloidowej na podłożu samoprzylepnego polimeru, oraz z warstwy zewnętrznej - błony poliuretanowej. Opatrunek pod działaniem wydzielin z rany tworzy wilgotne środowisko sprzyjające procesom gojenia, wchłania płyny wysiękowe oraz wspomaga autolizę tkanek martwiczych.

Przeznaczenie:

Granuflex® Extra Thin to opatrunek hydrokoloidowy na rany przewlekłe w końcowym etapie ich gojenia (owrzodzenia podudzi na tle niewydolności żylniej i tętniczej, odleżyny, owrzodzenia cukrzycowe), rany naskórkujące, odleżyny I stopnia, rany świeże, otarcia, skaleczenia. Opatrunek Granuflex® Extra Thin stosuje się w leczeniu ran mało sączących.

Sposób użycia:

1. Umyj ręce, oczyść i przemyj ranę i otaczającą ją skórę.
2. Zmierz ranę aby dobrać właściwy rozmiar opatrunku, pozostawiając margines około 3 cm większy od rozmiaru rany.
3. Ogrzej opatrunek pomiędzy dłońmi.
4. Usuń zewnętrzną papierową część opatrunku, unikając kontaktu palców z lepłą stroną opatrunku.
5. Przyłóż przylepną stronę opatrunku na środek rany.
6. Usuń dolną papierową część opatrunku, przytrzymując opatrunek na ranie, ale go nie rozciągając.
7. Delikatnie wygładź opatrunek na ranie, dociskając go przez 30-60 sekund.

Usuwanie opatrunku:

1. Delikatnie podnieś jeden róg opatrunku.
2. Rozciągaj go, aż zacznie odstawać od skóry. Powtórz czynność z pozostałymi rogami, dopóki cały opatrunek nie odklei się od rany.

Warunki przechowywania:

Przechowywać w temperaturze pokojowej. Chronić przed niską temperaturą i wysoką wilgotnością.

Uwaga!

Opatrunki nie powinny być stosowane u osób, o których wiadomo, że są uczulone na opatrunki Granuflex lub ich składniki.