

OPTILET PRO nakłuwacz automatyczny 1 szt.



Cena: 10,12 PLN

Opis słownikowy

Producent	DIAGNOSIS S.A.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

OPTILET PRO Nakłuwacz automatyczny to wyrób medyczny, który służy do pobierania próbek krwi kapilarnej do badania poziomu glukozy.

Nakłuwacz Optilet Pro to bezpieczny i wygodny nakłuwacz, który służy do pobierania próbek krwi kapilarnej do badania poziomu glukozy. Dzięki regulowanej końcówce można dopasować głębokość nakłucia do większości rodzajów skóry. Urządzenie posiada 9 ustawień głębokości nakłucia (od 1 do 9), przeznaczonych do różnych rodzajów skóry.

Pamiętaj! Przed wykonaniem nakłucia należy zawsze umyć ręce ciepłą wodą z mydłem i dokładnie je wysuszyć. Mniejsze wartości są przeznaczone do nakłuć płytszych, natomiast większe do nakłuć głębszych. Płytsze nakłucia są odpowiednie dla dzieci i większości dorosłych. Głębsze nakłucia sprawdzają się w przypadku osób z grubszą lub zrogowaciałą skórą. Istnieje również możliwość wykonania nakłucia w miejscach alternatywnych (poza opuszką palca). Służy do tego specjalna nasadka dołączona do zestawu. Nakłuwacz jest przeznaczony dla dzieci i dorosłych.

OPTILET PRO Nakłuwacz automatyczny - stosowanie

1. Ostrożnie odkręć nasadkę z nakłuwacza.
2. Umieść lancet Umieść lancet w uchwycie; wciśnij do samego końca.
3. Ostrożnie zdejmij osłonkę ochronną lancetu Ukręć i zdejmij osłonkę ochronną lancetu, aby oddzielić ją od lancetu. Zachowaj osłonkę ochronną lancetu – będzie potrzebna do bezpiecznego usunięcia lancetu.
4. Nałóż nasadkę na urządzenie i dokręć ją dobrze. Uważaj, aby nie dotknąć odsłoniętej igły lancetu.
5. Regulacja ustawienia głębokości nakłucia: przekręcając obrotową końcówkę do regulacji głębokości nakłucia można wyregulować głębokość nakłucia wybierając cyfry od 1 do 9 – mniejsze cyfry oznaczają płytsze nakłucie, a większe cyfry głębsze nakłucie. Wybrana wartość widoczna będzie na wskaźniku głębokości nakłucia. Wybierz pożądaną głębokość nakłucia, aby pozyskać odpowiednią próbkę krwi z jak najmniejszym dyskomfortem. Urządzenie posiada 9 ustawień głębokości nakłucia:

- 1, 2 – dla delikatnej skóry
- 3, 4 – dla normalnej skóry
- 5, 6, 7, 8, 9 – dla grubej lub zrogowaciałej skóry

6. Odciągnij przycisk naciągający nakłuwacza do momentu, aż usłyszysz kliknięcie.

NAKŁUWANIE OPUSZKI PALCA

1. Przed pobraniem próbki krwi umyj ręce i miejsce nakłucia ciepłą wodą i mydłem. Dobrze wypłucz i wysusz ręce.
2. Aby uzyskać wystarczającą próbkę krwi rozmasuj energicznie miejsce pobrania.
3. Przyłóż nakłuwacz do palca, z którego ma być pobrana próbka krwi. Wciśnij przycisk zwalniający, żeby wykonać nakłucie.