


PREZER. NC WETN WILD * 3 SZT. 3 SZT.

Cena: 4,49 PLN

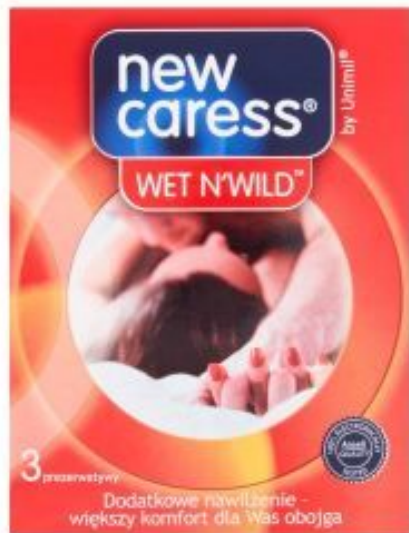

Opis słownikowy

Producent	UNIMIL KRAKÓW
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Prezerwatywy New Caress Wet N&apost; Wild to dodatkowo nawilżane prezerwatywy, które zapewniają komfortowe i pełne doznań zbliżenia.

Działanie

Właściwe użycie prezerwatyw New Caress pomaga zredukować ryzyko ciąży, HIV/AIDS oraz chorób przenoszonych drogą płciową,

Sposób użycia

Produkt należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu oraz chronić przed działaniem światła słonecznego. Należy zawsze sprawdzać datę ważności na foliowym opakowaniu prezerwatywy. Nie należy używać prezerwatywy po upływie tego terminu lub gdy opakowanie foliowe jest uszkodzone.

- Otwórz opakowanie i delikatnie wyjmij prezerwatywę. Prezerwatywy są wytrzymałe ale mogą zostać uszkodzone ostrymi paznokciami, zębami lub biżuterią.

- Prezerwatywę zawsze zakładaj na penisa przed jakimkolwiek kontaktem seksualnym i wyłącznie wtedy, kiedy penis jest w stanie erekcji. Zmniejszy to ryzyko ciąży, zakażenia chorobami przenoszonymi drogą płciową. Prezerwatywę można rozwinąć tylko w jednym kierunku. Nie należy całkowicie rozwijać prezerwatywy przed jej użyciem. Sprawdź czy prezerwatywa jest ułożona odpowiednią stroną do góry.

- Ściśnij końcówkę prezerwatywy, aby wypchnąć zgromadzone w niej powietrze i zrobić miejsce na spermę. Pozostawienie powietrza w prezerwatywie może zwiększyć ryzyko jej uszkodzenia. Nie stosuj środków nawilżających na bazie olejków takich jak wazelina, balsamy i olejki kosmetyczne olejki do masażu, oliwki dla dzieci, masło, margaryna itp. ponieważ środki na bazie olejków działają niszcząco na prezerwatywy z lateksu naturalnego. Używaj wyłącznie środków nawilżających nadających się do stosowania z prezerwatywami. Stosowanie niektórych leków może powodować uszkodzenie prezerwatywy dlatego zawsze skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

- Po stosunku ostrożnie wycofaj penisa nadal będącego w stanie erekcji. Przytrzymaj krawędź prezerwatywy u nasady penisa, aby

zapowiedź ewentualnemu wyciekowi nasienia. Skieruj penis w dół i ostrożnie zsuń z niego prezerwatywę. Trzymaj penis z dala od pochwy, aby uniknąć kontaktu ze spermą.

- Zawiąż koniec zużytej prezerwatywy i zwiń ją w chusteczkę. Następnie wyrzuć ją w higieniczny sposób. Nie wolno wyrzucać prezerwatywy do toalety.

Ostrzeżenia

Produkt jest wykonany z lateksu kauczuku naturalnego, który może wywoływać reakcje alergiczne, w tym szok anafilaktyczny. Właściwe stosowanie prezerwatyw New Caress pomaga ograniczyć ryzyko ciąży oraz wielu chorób przenoszonych drogą płciową. Żadna metoda antykoncepcji nie zapewnia 100% ochrony.

Produkt należy stosować zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zawartość:

3 sztuki

Sposób przechowywania: poniżej 25°C