


PROTEFIX - PROSZEK MOCUJĄCY 50 G PROSZ 50

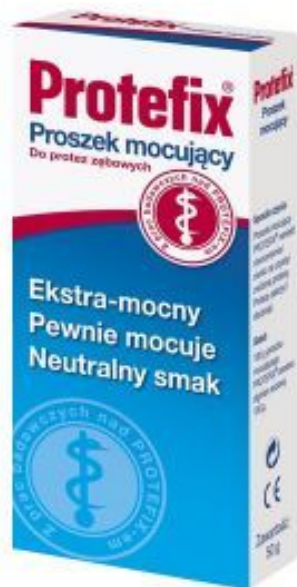

Cena: 22,48 PLN

Opis słownikowy

Producent	QUEISSER PHARMA GMBH & CO.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Proszek mocujący Protefix to sprawdzony środek mocujący do protez zębowych, który idealnie sprawdza się w przypadku niewielkich problemów z przyczepnością lub rozrzedzoną śliną. Proszek mocujący Protefix jest wysypywany na wilgotną protezę i natychmiast po jej wsunięciu wykazuje niezawodną i długotrwałą przyczepność. Bezwonny i bezzapachowy wykonany z naturalnego alginianu sodu jest szczególnie polecany dla wrażliwych błon śluzowych jamy ustnej.

Działanie

Preparat do mocowania protez zębowych.

Skład

Alginian sodowy

Sposób użycia

Rozsypać proszek mocujący Protefix równomierną, cienką warstwą na wilgotną protezę. Natychmiast po wsunięciu proteza jest mocowana na swoim miejscu i trzyma stabilnie przez wiele godzin w jamie ustnej. W przypadku przedwczesnego rozluźnienia – np. w wyniku spożywania dużej ilości płynu – wystarczy ponownie posypać protezę cienką warstwą proszku mocującego Protefix.

Ewentualne pozostałości proszku można łatwo zmyć z protezy szczoteczką do zębów pod bieżącą wodą. Szczególnie uporczywe resztki środka mocującego można usunąć bawełnianym wacikiem nasączonym olejem jadalnym. Aby uniknąć zbyt wysokiego zużycia środka, nie należy ścisnąć butelki.

Trzymać butelkę pod kątem i delikatnie uderzać w nią palcem wskazującym. Taki sposób zapewnia dokładne dozowanie. W przypadku stosowania zbyt dużej ilości proszku mocującego może dojść do jego utwardzenia, co zwiększa ryzyko uszkodzenia błony śluzowej jamy ustnej.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na jakikolwiek składnik preparatu.

Ostrzeżenia

Stan jamy ustnej i protezy należy regularnie konsultować z lekarzem.

Stosowanie proszku mocującego dozwolone jest tylko na zdrową śluzówkę jamy ustnej.

Nie stosować długotrwale bez konsultacji z lekarzem.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie używać po upływie terminu ważności.

Produkt należy stosować zgodnie z jego przeznaczeniem.

Działania niepożądane

W pojedynczych przypadkach niewykluczone są reakcje alergiczne śluzówki jamy ustnej lub całego organizmu. W przypadku zaistnienia podejrzenia alergii prosimy skonsultować się z lekarzem stomatologiem.

Zawartość:

50 g