

SOLWAX ACTIVE krople 15 ml



Cena: 21,59 PLN

Opis słownikowy

Producent	ARKONA
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Solwax active, spray, 15 ml

Skład

Glycerine, 1,2-propanediol, Carbamide peroxide, Ethylenediaminetetraacetic Acid Disodium Salt, Ethylene alcohol, Sodium citrate.

skutecznie usuwa złoży woskowinowe
po aplikacji do przewodu słuchowego zewnętrznego uwalniany jest aktywny tlen, który przyczynia się do usuwania złoży woskowiny usznej

unikalna formuła i wygodna forma umożliwia stosowanie u dzieci i dorosłych

Wskazania

Solwax active stosuje się w celu usunięcia złoży woskowiny usznej oraz zapobieganiu ich ponownemu gromadzeniu u dzieci powyżej 12 roku życia i dorosłych.

Sposób użycia

Przed użyciem należy buteleczkę ogrzać w dłoni. Trzymając butelkę w pozycji pionowej zbliżyć końcówkę aplikatora do przewodu słuchowego i zaaplikować zgodnie z poniższym-

Profilaktycznie: 1-2 dawki do każdego ucha 1-2 razy w tygodniu aby zapobiec tworzeniu się złoży woskowinowych.

Przy korku woskowinowym jeśli lekarz nie zaleci inaczej, aplikować 1-2 dawki dwa razy dziennie przez ok. 4-5 dni przed wizytą u lekarza. Profilaktycznie dla osób uprawiających sporty wodne, rozpylić 1-2 dawki do każdego ucha bezpośrednio po kąpiel. Zabieg ten eliminuje efekt zalegania wody w kanale ucha po kąpiel.

Przeciwwskazania i środki ostrożności

Nie należy stosować preparatu w przypadku bolesności ucha, perforacji błony bębenkowej, uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu oraz w przewlekłych stanach zapalnych ucha środkowego i przewodu słuchowego.

Nie wprowadzać aplikatora do przewodu słuchowego zbyt głęboko.

Unikać kontaktu z oczami.

Nie połykać.

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Chronić od światła.
Po otwarciu zużyć w ciągu 6 miesięcy.