

## STOPERY przeciwhałasowe piankowe jednorazo

Cena: 2,29 PLN



### Opis słownikowy

Producent SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji

### Opis produktu

#### Stoperesy przeciwhałasowe piankowe jednorazowe

Stoperesy przeciwhałasowe piankowe jednorazowe APTEO posiadają stożkowy kształt, który zapewnia dopasowanie do większości kanałów słuchowych.

#### Sposób użycia:

- Wkładkę zrolować palcami, aby ukształtować wałeczek bez zagnieceń.
- Dla zapewnienia prawidłowego ułożenia wkładki, wyciągnąć rękę nad głowę i delikatnie odciągnij ucho do góry i na zewnątrz. Umieścić zrolowaną wkładkę w kanale słuchowym.
- Przytrzymać koniec wkładki przy uchu do momentu jej pełnego rozkurczenia. Jeśli wkładka jest umieszczona prawidłowo, tylko jej koniec powinien być wyczuwalny. Jeśli większość wkładki znajduje się poza kanałem słuchowym, wyjąć ją i ponownie dopasować.
- Aby wyjąć wkładkę, delikatnie ją przekręć i powoli wyciągnąć z przewodu słuchowego, tak aby zapobiec ewentualnemu uszkodzeniu błony bębenkowej.

Przechowywać z dala od niemowląt i małych dzieci. Używać i przechowywać wkładki w temperaturze od -20°C do 35°C. Stoperów nie należy wkładać zbyt głęboko do kanału słuchowego, ponieważ trudno będzie je wyjąć.