


## TEST na PSA na prostatę

Cena: 32,39 PLN

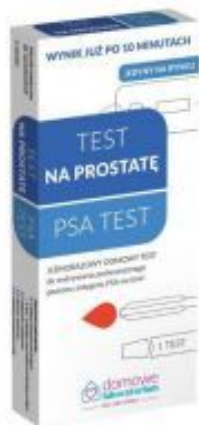

### Opis słownikowy

Producent	HYDREX DIAGNOSTICS SP. Z O.O.SP.K.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny

### Opis produktu

Test PSA (ang. Prostate Specific Antigen) do wykrywania antygenu prostaty to wyrób medyczny przeznaczony do samokontroli w warunkach domowych. Test ma ogromne znaczenie w profilaktyce stanów patologicznych (np. zapalenia gruczołu krokowego, łagodnego przerostu gruczołu krokowego czy nowotworu).

#### Zawartość opakowania:

Aluminiowa, szczelnie zamknięta kopertka, w której znajduje się: płytka testowa, plastikowa pipetka i środek pochłaniający wilgoć; pojemnik z zakraplaczem zawierający 1 ml diluentu (rozcieńczalnika); sterylny lancet do nakłucia palca; instrukcja wykonania testu.

#### Wskazania:

Wykonanie testu zalecane jest jako element profilaktyki dla mężczyzn po ukończonym 45. roku życia. Ponadto, wskazaniami do jego wykonania są:

- trudności z oddawaniem moczu,
- nagła potrzeba oddania moczu,
- wrażenie niepełnego opróżnienia pęcherza,
- częsta potrzeba korzystania z toalety,
- kłopot z rozpoczęciem oddawania moczu,
- słaby bądź przerywany strumień,
- wydłużony czas oddawania moczu,
- problemy z erekcją.

#### Sposób użycia wyrobu medycznego:

W celu dokonania poprawnego testu należy dokładnie zapoznać się z dołączoną do niego instrukcją obsługi.

- Tuż przed wykonaniem badania dokładnie umyć ręce mydłem, wypłukać wodą i wysuszyć.
- Rozerwać foliową kopertkę wzdłuż nacięcia i wyjąć z niej płytkę testową i plastikową pipetkę. Środek pochłaniający wilgoć należy wyrzucić.
- Aktywować nakłuwacz. Wziąć do ręki nakłuwacz i odkręcić, a następnie usunąć z niego szarą nasadkę zabezpieczającą i bez dotykania

przycisku zwalniającego sprężynę.

- Zdezynfekować opuszkę palca serdecznego lub środkowego wacikiem nasączonym alkoholem. Zwiększyć ukrwienie opuszki przez masowanie palca w kierunku od nasady palca do jego końca.
- Przyłożyć nakłuwacz do zdezynfekowanej opuszki palca tak, aby ściśle on do niej przylegał i nacisnąć przycisk zwalniający sprężynę .
- Ostrze automatycznie i w bezpieczny sposób schowa się do obudowy nakłuwacza.
- Lekko pomasaż palec, aby uzyskać większą kroplę krwi .
- Trzymając pipetkę w pozycji poziomej, zbliżyć jej końcówkę do kropli krwi. Nie ścisnąć przy tym ani samej pipetki, ani opuszki palca. Pod wpływem sił kapilarnych krew zacznie wpływać do pipetki. Pipetkę trzymać przytkniętą do kropli tak długo, aż krew wypełni ją do czarnej kreski . - Jeśli jest taka potrzeba jeszcze raz pomasaż palec. Unikać pęcherzyków powietrza.
- Ścisnąc pipetkę, wprowadzić krew do okrągłego okienka na płytce testowej. Odczekać 30 – 40 sekund, aż krew zostanie całkowicie wchłonięta.
- Odkręcić niebieską nakrętkę pojemnika z diluentem (pozostawiając białą nakrętkę szczelnie dokręconą) i wprowadzić do tego samego okienka diluent. - W tym celu należy, trzymając pionowo pojemnik z diluentem, wprowadzić powoli dokładnie 4 krople diluentu do okrągłego okienka na płytce testowej, zachowując 2 – 3 sekundowe przerwy między nanoszonymi kroplami .
- Odczytać wynik testu po 10 minutach. Nie brać pod uwagę wyniku otrzymanego po czasie dłuższym niż 15 minut.

Każda forma przerostu prostaty, nawet ta łagodna, powinna być monitorowana przez lekarza. Pozwoli to uniknąć groźnych dla zdrowia i życia komplikacji.

Jak w przypadku każdego testu domowego, wyniki uzyskane przy użyciu testu PSA nie powinny stanowić jedynej podstawy do podejmowania decyzji dotyczących leczenia.