

## URGO Na pęcherze średni rozmiar x 5 szt



Cena: 20,69 PLN

### Opis słownikowy

Producent	LABORATORIA POLFA ŁÓDŹ SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny

### Opis produktu

#### Opis produktu:

Urgo ultradyskretne plastry na pęcherze z podwójną masą hydrokoloidową działają, jak druga skóra. Absorbują wydzielinę powstającą w pęcherzu, tworząc żelową poduszczkę ochronną, która:

natychniast łagodzi ból,  
przyspieszają gojenie,  
chronią ranę, działając jak druga skóra,  
przynoszą długotrwałą ulgę i ochronę.

#### Działanie:

Specjalnie zaprojektowane i niezwykle odporne plastry znakomicie pokrywają średnie pęcherze, dopasowują się do kształtu stopy, skutecznie eliminują bolesne pęcherze. URGO ultradyskretne plastry na pęcherze z podwójną masą hydrokoloidową chronią skórę przed uciskiem i otarciami, natychmiast łagodząc ból. URGO ultradyskretny plaster w kontakcie z pęcherzem tworzy ochronny hydrokoloidowy żel regenerujący skórę, który sprzyja szybszemu gojeniu się rany. Specjalnie zaprojektowane wytrzymałe i bardzo dyskretne plastry umożliwiają noszenie odkrytego obuwia.

#### Wskazanie:

- 1.Nie przekuwaj pęcherza. Jeśli pęcherz jest już przebity, oczyść go wodą i mydłem oraz zastosuj środek antyseptyczny. Umyj oraz osusz skórę przed zastosowaniem Plastra URGO na Pęcherze.
- 2.Usuń przezroczystą folię ochronną (oznaczoną strzałkami), unikając dotykania warstwy samoprzylepnej. Ogrzej plaster w dłoniach, po czym usuń warstwę ochronną.
- 3.Pozostaw plaster aż do momentu, kiedy sam zacznie się odklejać. Aby usunąć plaster: nie pociągaj do góry, tylko powoli rozciągaj go wzdłuż skóry, aż całkowicie się odklei.
- 4.Zmieniaj plaster tak często jak to konieczne.