

URGO Oparzenia i rany powierzchniowe 5x5 x 6szt

Cena: 20,85 PLN



Opis słownikowy

Producent	LABORATORIA POLFA ŁÓDŹ SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Opis Produktu:

URGO Plastry na Oparzenia z technologią lipido-koloidalna o skuteczności potwierdzonej w badaniach.

Szybko uśmierzają ból.

Ułatwiają gojenie.

Umożliwiają bezbolesne usuwanie.

Nie przyklejają się do rany.

Działanie:

URGO plastry na oparzenia z unikalną technologią lipidokoloidalną – nie przywierają, przepuszczają powietrze. Dzięki warstwie ochronnej zbudowanej z poliestru i siateczce w technologii lipidokoloidalnej połączonej z elementami hydrokoloidowymi oraz wazeliną uśmierza ból i sprzyja gojeniu. Ponadto plaster nie przykleja się do rany i można go bezboleśnie zdjąć.

Stosowanie:

1. Oczyszczyć ranę środkiem antyseptycznym bez alkoholu. Opłucz wodą lub roztworem soli fizjologicznej URGO.

2. W przypadku oparzenia nigdy nie stosuj środków antyseptycznych zawierających eozynę.

3. Nałożyć na obszar przeznaczony do leczenia - o ile to możliwe, nie ruszać pęcherza, ponieważ chroni przed zakażeniem. Jeżeli pęcherz jest pęknięty, odkaż obszar. Nie usuwaj martwej skóry, jeżeli sama nie odpada.

4. Stosuj od 5 do 6 dni, przy czym opatrunek należy zmienić po raz pierwszy po ich 24 godzinach, a następnie zmieniaj co 48 godzin.