

URGO URGOSTERILE 5*9 cm 10 szt



Cena: 22,49 PLN

Opis słownikowy

Producent URGO

Rodzaj rejestracji

Opis produktu

Opis produktu

Opatrunek Urgosterile to sterylny, samoprzylepny opatrunek pochłaniający wysięk odpowiedni do ochrony:

- ran powierzchniowych,
- ran ciętych,
- ran szarpanych,
- ran chirurgicznych,
- ran pourazowych.

Urgosterile to wyrób medyczny. Jest bardzo dobrze tolerowany przez każdy rodzaj skóry. Zastosowano w nim włókninowy kompres wyposażony w warstwę, która nie przywiera do rany, i która umożliwia bezbolesne jego usuwanie, minimalizując dyskomfort podczas wymiany opatrunku na nowy. Posiada również powierzchnię klejącą z czterech stron, dzięki której bardzo dobrze trzyma się skóry, całkowicie chroniąc ranę przed czynnikami zewnętrznymi. Pozwala skórze oddychać, zapobiegając maceracji naskórka i zabezpiecza przed powstawaniem otarć i podrażnień spowodowanych przez ubranie. Jest rozciągliwy, dzięki czemu nie napina skóry i nie obciąża stawów. Jest też łatwy w użyciu, również w warunkach domowych.

W opakowaniu znajduje się 10 opatrunków o wymiarach 5 cm x 9 cm. Każdy zapakowany jest w sterylną saszetkę. Jeden opatrunek można nosić przez 24-48 godziny w zależności od wysięku i stanu rany.

Zastosowanie

Do stosowania w przypadku ran powierzchniowych, ciętych, szarpanych, pourazowych i chirurgicznych.

Sposób użycia

Przed przyklejeniem opatrunku Urgosterile oczyść i odkaż ranę.
Przemyj ranę roztworem soli fizjologicznej i osusz brzegi rany sterylnym gazikiem.
Otwórz saszetkę i wyjmij opatrunek.

Usuń pierwszą zakładkę ochronną i przyłóż opatrunek na ranie, unikając dotykania kleju palcami. Upewnij się, że kompres całkowicie pokrywa ranę.

Nakładaj opatrunek stopniowo, zdejmując kolejne zakładki, wygładzając krawędzie, tak by nie naciągać opatrunku i skóry.

Opatrunek zmieniaj co 24 do 48 godzin, w zależności od stanu rany i opatrunku.

Składniki

białe, samoprzylepne podłoże z włókniny,

kompres z włókniny pokryty nieprzylegającą, ochronną gazą,

klej akrylowy.