

## Woreczek pobierania moczu jałowy dziewczynki 1 szt.

Cena: 2,15 PLN



### Opis słownikowy

Producent	ART-MED
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny

### Opis produktu

Pojemnik do pobierania moczu jałowy dla dziewczyn 1 sztuka

#### Sposób użycia:

1. Wyjąć pojemnik.
2. Odciągnąć załamane dno pojemnika.
3. Usunąć przekładkę papierową.
4. Przykleić pojemnik do ciała tak, aby otwór pokrywał się z anatomicznym ujściem cewki moczowej.
5. Napętniony pojemnik odkleić od ciała, załamać powierzchnię lepą, skleić.

#### Przeznaczenie:

Do pobierania moczu od noworodków i niemowląt.